

ROLLER20PN 全自動赤血球沈降速度測定装置

ALIFAX社製

測定時間が短縮できる検査法を選択しませんか？


装置の特徴

- + 最短約5分で測定結果を報告可能
- + EDTA採血管採取検体で測定可能
- + 少量検体で測定可能
- + 使いやすいソフトウェア
- + ミキシングから測定、廃液処理までフルオート
- + オンライン通信可能
- + サーマルプリンタ印字対応



測定原理

採血管から検体(EDTA血)をキャピラリーに吸引・静止させ、10秒間、赤血球の動き(凝集・沈降)を8,000回スキャンニングし、吸光度から血沈値(1時間値)を算出します。

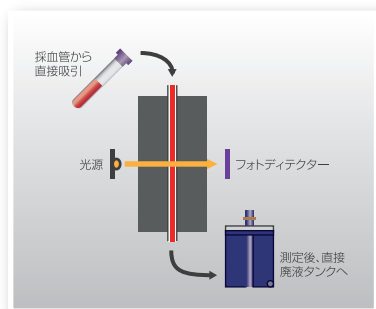

操作方法

STEP.1

検体IDをバーコードリーダーで読み取る

STEP.2

採血管を挿入する

STEP.3

測定開始ボタンを押す



検体カード使用について

ALIFAX社製測定機器を使用し血沈測定を行う場合は「検体カード」が必要となります。測定機器購入時の付属品に検体カードは含まれておりませんのでご注意ください。検体カードは3種類ございますので、運用の際に導入施設様にてご用意いただけますようお願い申し上げます。



検体カードの使用例

仕 様		
名 称	ROLLER20 PN 全自動赤血球沈降速度測定装置	
処理検体数	20検体	
処理能力/時間	75検体	
必要検体量	自動	175μL
	手動	100μL
測定時間	20秒	
消費電力	115VA	
寸法 (W×D×H)	240×390×460mm	
重 量	16kg	
製造販売届出番号	13B1X10181000019	

検体カード	規 格
検体カード1000	1000テスト
検体カード4000	4000テスト
検体カード10000	10000テスト

コントロール試薬	規 格
ラテックスコントロール (6テスト)	6テスト
ラテックスコントロール (30テスト)	30テスト

製造販売業者

フィンガルリンク株式会社

〒111-0041
東京都台東区元浅草二丁目6番6号 東京日産台東ビル5F
TEL : 03-6802-7145(代表) FAX : 03-6802-7156
E-mail : info@finggal-link.com

販売店

製造業者

Alifax S.r.l.